

MEMO – Préparation du patient avant un examen d'ergospirométrie

1 Entrer les données du patient

i Le patient parlera moins facilement une fois le masque posé.



- Ouvrir le logiciel
- Cliquer sur 
- Entrer les données et valider

!

- Entrer un identifiant patient
- Pour les VO₂, entrer l'origine ethnique

- Cliquer sur 
- Si le message de calibration du point zéro apparaît (toutes les 15 minutes), ne pas déplacer le pneumotachographe et éviter toute respiration dans le capteur jusqu'à la disparition du message.

2 Installation du patient

- Brancher les électrodes sur le patient.

i En cas d'utilisation d'un système par aspiration, humidifier la peau avec le spray fourni ou de l'eau. Ne pas asperger directement les électrodes.

- Installer le brassard.

i Le micro doit être positionné au niveau de l'artère brachiale et la tubulure vers le haut



- Positionner le masque sur le patient avec le harnais.
- Vérifier l'étanchéité du masque : bloquer le flux d'air au niveau de l'ouverture du masque avec la paume de votre main et le connecteur du tube Nafion avec votre doigt. S'il y a une fuite, changer la taille du masque ou resserrer le harnais.



- Connecter l'adaptateur sur le capteur de débit, du côté repéré par un petit trou.
- Raccorder les deux câbles transparents au capteur, bague bleue côté adaptateur.
- Connecter le tout sur le masque, câbles dirigés vers le haut.
- Raccorder le tube Nafion sur le masque grâce à l'Anti-twist.

