

MEMO – Réaliser une spirométrie avec le CS-200 Office/Excellence

❖ Après avoir créé le patient, cliquer sur l'icône 


❖ L'écran de spirométrie apparaît sur le logiciel LFX (écran de droite)



Si le message de calibration du point zéro apparaît (toutes les 15 minutes) : ne pas déplacer ni respirer dans le capteur jusqu'à disparition.



❖ Cliquer sur **Démarrer** pour lancer l'acquisition des courbes.

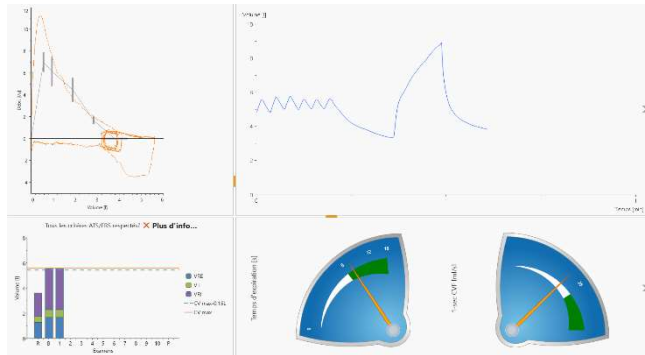

❖ Cliquer sur **Stop** pour arrêter la mesure




❖ Pour réaliser un autre essai, cliquer sur **Ajouter essai**
Il est conseillé de réaliser trois essais pour avoir une valeur de VEMS fiable.



Il se peut que la courbe du meilleur essai soit une combinaison de plusieurs essais. On retrouve alors la meilleure courbe d'inspiration et la meilleure courbe d'expiration.


❖ Les résultats s'affichent :

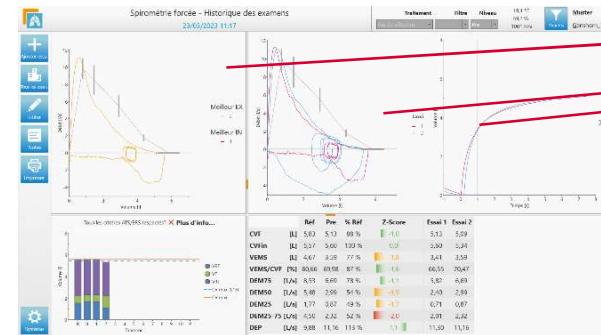


➔ Meilleur essai
➔ Tous les essais



❖ En cliquant sur **Tous les essais** il est possible de visualiser tous les essais effectués et de modifier les courbes du meilleur essai.

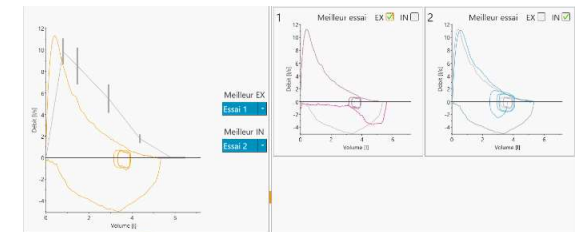

❖ En cliquant sur **Editer** il est possible d'exclure des essais (inspiration et/ou expiration) et de modifier les mesures des volumes.

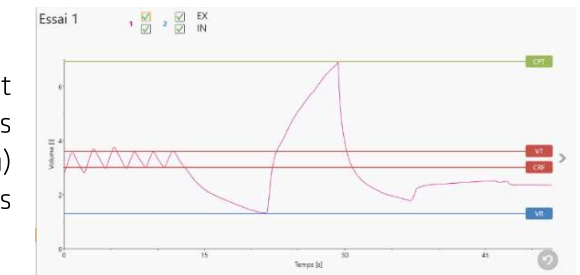

❖ Pour imprimer le rapport de spirométrie, cliquer sur **Imprimer**