


MEMO - Réaliser un examen d'ergospirométrie avec le CS-200 Office/Excellence


1 Lancer l'examen


- À partir de l'écran de gauche, créer ou sélectionner un patient puis cliquer sur l'icône  en bas à droite.

- Sur l'écran VO2 (à droite), choisir la bonne taille de masque dans la fenêtre qui s'affiche puis valider.

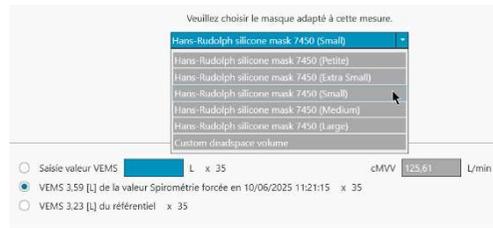

- Sur SDS-200 (à gauche), choisir le protocole et cliquer sur  pour lancer la phase de pré-test.

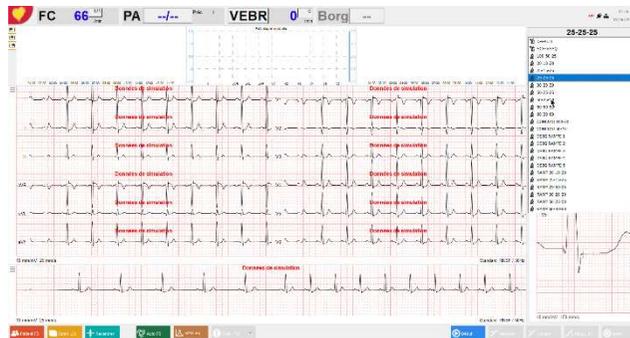


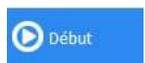
- Cliquer à nouveau sur  pour démarrer l'effort.

2 Module ECG (écran de gauche)

- Cliquer sur  pour lancer une prise de tension.
- Cliquer sur  pour imprimer un ECG en direct.
- Cliquer sur  pour marquer un événement.
- Cliquer sur  pour maintenir le palier actuel.
- Modifier les Watts par pas de 1 avec les flèches HAUT et BAS du clavier.
- Cliquer sur  pour passer au palier suivant.
- Cliquer sur  pour lancer la phase de récupération.

3 Module VO2 (écran de droite)

- L'onglet **Mon graphique** affiche trois courbes. Pour modifier les paramètres affichés sur une courbe, cliquer sur les paramètres en haut de l'écran. Pour agrandir un graphique, il suffit de cliquer sur la petite flèche à gauche du graphe

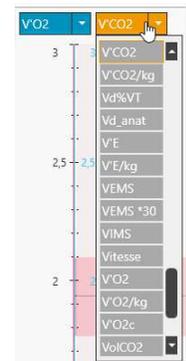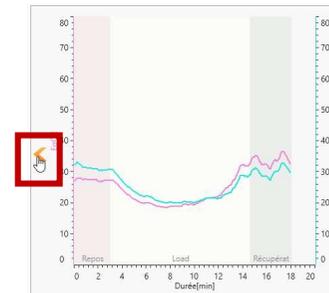

MEMO - Réaliser un examen d'ergospirométrie avec le CS-200 Office/Excellence

- ❖ L'onglet **Graphique Wasserman** permet d'afficher les 9 graphiques de Wassermann.
- ❖ L'onglet **Personnalisation Graphique Wasserman** permet d'afficher 9 graphiques personnalisés.
- ❖ L'onglet **Valeurs cycle à cycle** permet d'afficher les valeurs numériques cycle à cycle

❖ Pour modifier les courbes de Wasserman personnalisées ou les 8 paramètres numériques affichés, allez dans le menu



4 Gaz du sang

- ❖ Pour ajouter une mesure des gaz du sang, cliquer sur l'icône
- ❖ Cliquer sur « Oui ».




Les valeurs seront à renseigner une fois l'examen terminé

5 Enregistrer une courbe débit/volume

- ❖ Se rendre dans l'onglet **Données en ligne**, l'enregistrement démarre automatiquement

- ❖ Une barre de progression s'affiche à l'écran sous « Données en ligne » dès le début de l'enregistrement. Elle indique le temps restant pour effectuer la manœuvre.

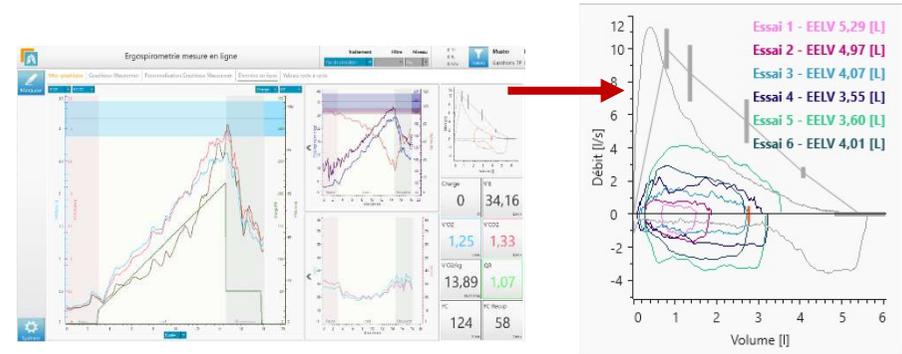

6 Terminer l'épreuve

- ❖ Cliquer sur **Arrêt** pour arrêter l'épreuve



La VO2 se stoppe en même temps que l'épreuve d'effort. Si vous le souhaitez, vous pouvez enlever le masque du patient avant d'appuyer sur stop : les courbes de VO2 seront stoppées mais vous aurez toujours la surveillance ECG.