



Guide de mise à jour EOLife Connect et EOLife X

Version 2.1.0 – Septembre 2023

Suivez les instructions ci-dessous pour réaliser la mise à jour de votre EOLife X à l'aide de l'application EOLife Connect V2.1.0.

Informations importantes :

- La mise à jour n'est possible que sur tablette.
- Il est nécessaire d'activer le Wifi de votre tablette pour réaliser la mise à jour de votre EOLife X.
- La mise à jour n'entraîne pas la suppression des données de l'application.
- La mise à jour dure 45 minutes environ.

3 étapes


Guide de mise à jour EOLife Connect et EOLife X.....	1
I. Configuration de votre EOLife X.....	2
a. Vérification de la version de votre EOLife X	2
b. Activation du Bluetooth de votre EOLife X	2
II. Configuration de votre tablette	3
III. Configuration EOLife Connect pour mise à jour de votre EOLife X.....	4
a. Cas d'utilisation normale	4
b. Difficultés	6



I. Configuration de votre EOLife X

a. Vérification de la version de votre EOLife X


1. Allumez votre EOLife X.
2. Vérifiez que votre EOLife soit suffisamment chargé (50% de batterie recommandée).
3. Affichez l'écran des Statistiques en appuyant sur le **bouton physique ON/OFF**.
4. Affichez l'écran des Paramètres en appuyant sur l'icône **Clé à molette**.
5. Affichez l'écran de version de logiciel en appuyant sur l'icône **Informations**.

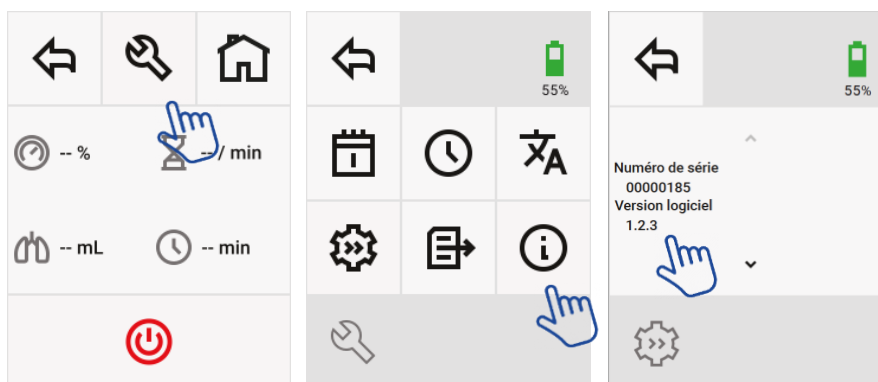

- i. Si la version du logiciel de votre EOLife X est **supérieure ou égale à v1.0.2**, passez à l'étape B, activation du Bluetooth de votre EOLife X.
- ii. Si la version du logiciel de votre EOLife X est **inférieure ou égale à v1.0.2**, veuillez contacter l'équipe commerciale d'Archeon.

b. Activation du Bluetooth de votre EOLife X

- 1) Allumez votre EOLife X.
- 2) Affichez l'écran des Statistiques en appuyant sur le **bouton physique ON/OFF**.
- 3) Affichez l'écran des Paramètres en appuyant sur l'icône **Clé à molette**.
- 4) Affichez l'écran de Communication Bluetooth en appuyant sur l'icône **Feuille** et gardez votre dispositif ouvert sur cette fenêtre.

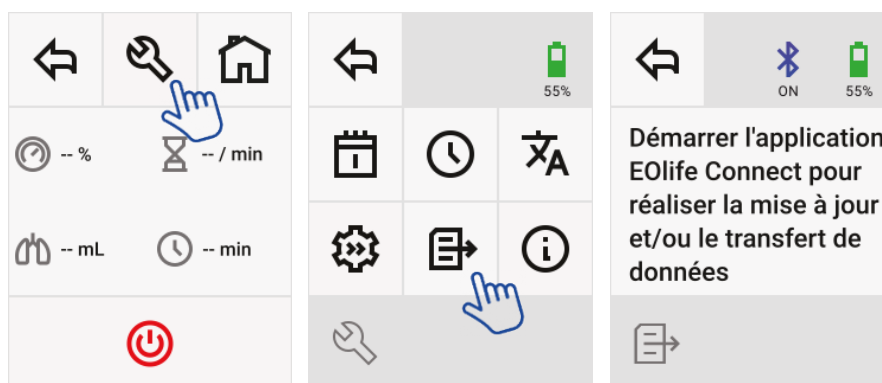



II. Configuration de votre tablette

Suivez les instructions ci-dessous pour réaliser l'installation de l'application sur votre tablette selon le système d'exploitation installé (iOS pour Apple, Android sinon).

a. Android

1. Vérifiez que votre connexion **internet** soit active.
 - Ouvrez le menu Paramètres depuis l'écran principal.
 - Appuyez sur le menu Connexions
 - Appuyez sur l'item Wifi.
 - Appuyez sur le bouton d'activation.
2. Activez le **Bluetooth** de votre tablette :
 - Ouvrez le menu Paramètres depuis l'écran principal.
 - Appuyez sur le menu Connexions.
 - Appuyez sur l'item Bluetooth.
 - Appuyez sur le bouton d'activation.
3. Activez la **localisation** de votre tablette :
 - Ouvrez le menu Paramètres depuis l'écran principal.
 - Appuyez sur le menu Position.
 - Appuyez sur le bouton d'activation.
 -

b. iOS


1. Vérifiez que votre connexion **internet** soit active.
 - Ouvrez le menu Réglages depuis l'écran principal.
 - Appuyez sur l'item Wifi.
 - Appuyez sur le bouton d'activation.
2. Activez le **Bluetooth** de votre tablette :
 - Ouvrez le menu Réglages depuis l'écran principal.
 - Appuyez sur l'item Bluetooth.
 - Appuyez sur le bouton d'activation.
3. Activez la **localisation** de votre tablette :
 - Ouvrez le menu Réglages depuis l'écran principal.
 - Appuyez sur le menu Confidentialité.
 - Appuyez sur le menu Service de localisation.
 - Appuyez sur le bouton d'activation.




III. Configuration EOLife Connect pour mise à jour de votre EOLife X

a. Cas d'utilisation normale

1. Depuis votre tablette, ouvrez l'application EOLife Connect.
2. Au premier démarrage d'EOLife Connect, autorisez l'application à utiliser le Bluetooth et la localisation.
3. Sélectionnez l'icône **réglages** puis à **propos** pour afficher la version de l'application EOLife Connect :

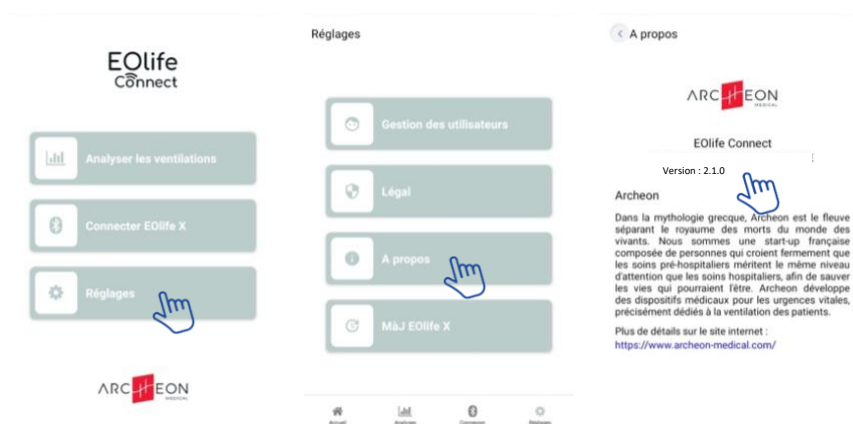

- Si vous avez déjà la version « 2.1.0 », continuez à l'étape n°4
- Si vous avez une version inférieure à « 2.1.0 » :
 - a) Allez sur **App store** (IOS) ou sur **Google Play** (Android)
 - b) Recherchez **EOLife Connect**
 - c) Cliquez sur **mettre à jour** l'application
 - d) Ouvrez l'application EOLife Connect une fois la mise à jour terminée
 - e) Sélectionnez l'icône **réglages** puis à **propos** pour afficher la version de l'application. La version 2.1.0 s'affiche.

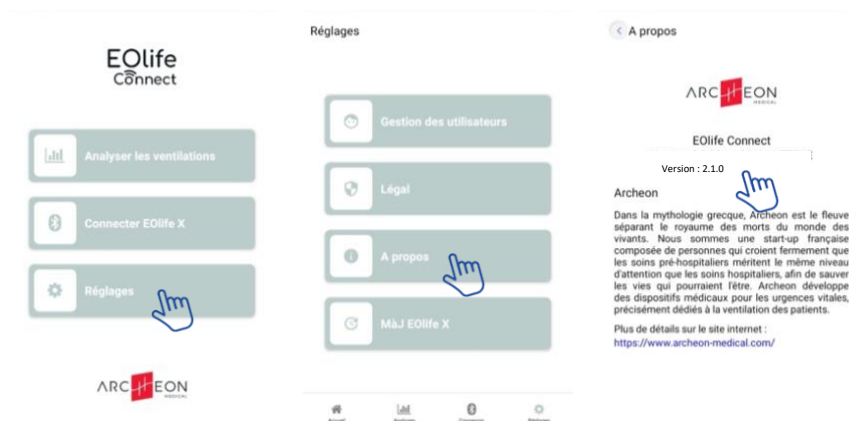





4. Retournez dans le menu **Réglages** puis sélectionnez **MàJ EOLife X**
5. Appuyez sur **Scanner** pour lancer la recherche de dispositifs EOLife X à proximité - dont le Bluetooth est activé.



6. Identifiez le **numéro de série** du dispositif que vous souhaitez mettre à jour. Le numéro de série est identifiable, au dos de votre dispositif, à côté du logo SN.

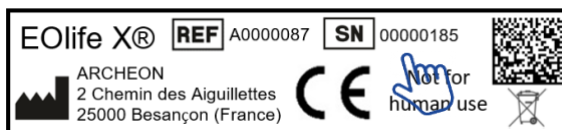

7. Sélectionnez le numéro de série correspondant et répondez "oui" au message "Voulez-vous mettre à jour votre EOLife X avec la version 2.1.0?".
8. Patientez pendant la mise à jour du produit jusqu'à l'**affichage d'un message de réussite**.

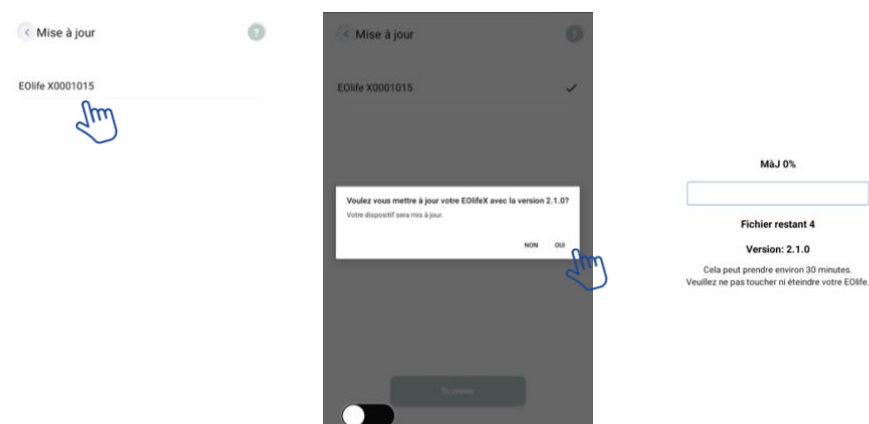



b. Troubleshooting

1. En cas de difficultés pour détecter votre dispositif, n'hésitez pas dans les paramètres de votre tablette à (voir II. Configuration).

- Vérifier votre connexion internet, impérative pour la mise à jour
- Désactiver puis réactiver le Bluetooth
- Désactiver puis réactiver la localisation
- Vérifier l'autorisation des permissions du Bluetooth
- Vérifier l'autorisation des permissions de la localisation
- Fermer et relancer EOLife Connect

2. En cas d'un crash pendant la mise à jour

Si l'application EOLife Connect s'interrompt pendant la mise à jour de votre EOLife X, veuillez recommencer la mise à jour depuis le début.

Si votre EOLife X ne redémarre pas (écran noir et led rouge allumée en haut à gauche du dispositif), veuillez recommencer la mise à jour depuis le début depuis l'application Connect.

3. Cas particulier après la mise à jour

Si le produit ne redémarre pas dans la langue souhaitée :

- 1) Affichez l'écran des Statistiques en appuyant sur le **bouton physique ON/OFF**.
- 2) Affichez l'écran des Paramètres en appuyant sur l'icône **Clé à molette**.
- 3) Affichez l'écran de Communication Bluetooth en appuyant sur l'icône **Langues** et sélectionnez la langue souhaitée.

