


CARDIOVIT FT-2



Standard 12-Lead

Notice simplifiée

Mode d'emploi du CARDIOVIT FT-2

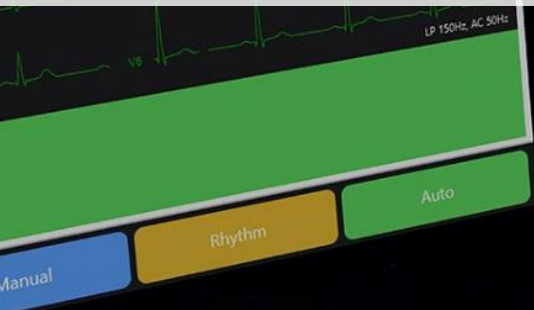

Manual Rhythm Auto

Version 1 mars 2024



Table des matières

1	Etape 1 : Données du patient	3
2	Etape 2 : Enregistrer l'ECC.....	4
3	Auto	5
4	Manuel.....	6
5	Rythme.....	7

1 Etape 1 : Données du patient

Supprimer les données patient

Saisir les données patient précédentes

The screenshot shows a patient data entry interface. At the top, it displays '01234' and 'Test Patient | 64 années 2 mois | Masculin'. The form contains several input fields: 'N° patient' (01234), 'Prénom' (Patient), 'Nom' (Test), 'Date de naissance' (01.01.1960), 'Sexe' (Masculin), 'N° visite', 'Taille (cm)' (158), 'Poids (kg)' (60), 'Origine ethnique' (Caucasien), and 'Stimulateur cardiaque' (Non). A virtual keyboard is overlaid on the form. At the bottom, there are three buttons: 'FDQ', 'Spirométrie', and 'Repos'.

N° patient	01234	Taille (cm)	158
Prénom	Patient	Poids (kg)	60
Nom	Test	Origine ethnique	Caucasien
Date de naissance	01.01.1960	Stimulateur cardiaque	Non
Sexe	Masculin		
N° visite			

Accéder à l'étape d'acquisition de l'ECC

2 Etape 2 : Enregistrer l'ECG

Affichage complet du signal

Vérification de la qualité du signal

Activer /désactiver la détection du pacemaker


Choix du filtre

Retour aux données patients

Impression sur l'imprimante thermique

Effectuer un enregistrement de rythme

Enregistrer l'ECG

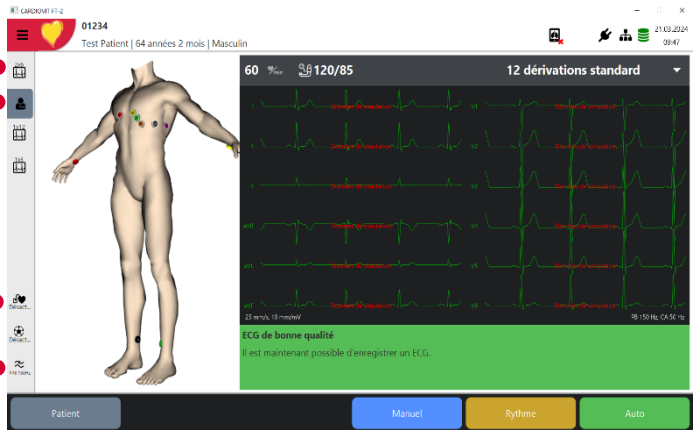

3 Auto

Auto

L'ECG est en cours d'enregistrement. Au bout de 10 secondes, le résultat est affiché

Moyenne

Tableau de mesures



Faire défiler l'enregistrement




Imprimer l'enregistrement

Supprimer ECG et retour à l'écran

Enregistrement de l'ECG et envoi sur l'ordinateur

4 Manuel

 **Manuel** : L'ECG s'imprime sur l'imprimante thermique en temps réel

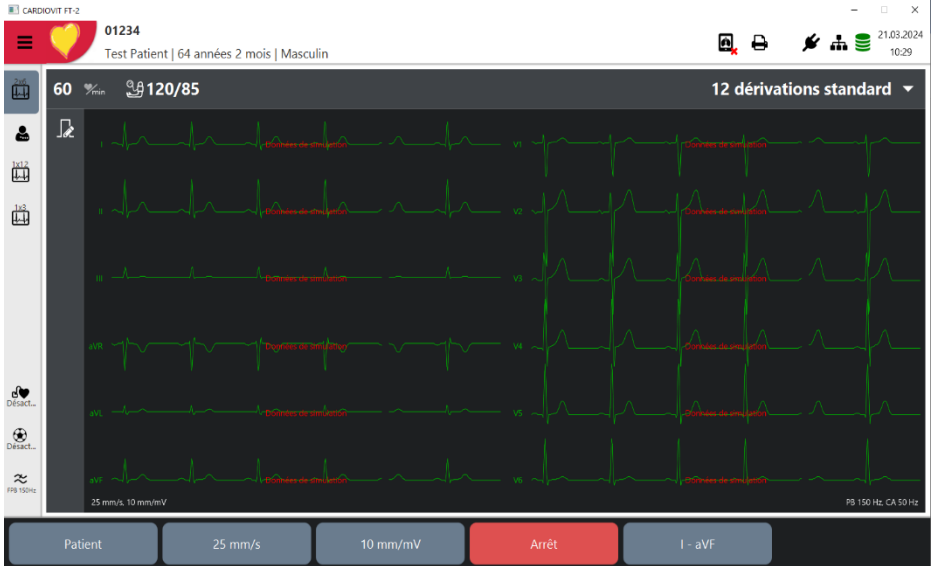



Vitesse Amplitude Arrêt de l'impression Séquence de dérivations

5 Rythme

Rythme

 : Lancement d'un enregistrement de rythme

Paramètres rythme 

Durée du rythme 

Afficher la boîte de dialogue de durée

Démarrage **Annuler**

Choix de la durée d'enregistrement


Affichage ou non de la durée d'enregistrement restante

Démarrer l'enregistrement. Il est ensuite possible de l'annuler ou de l'arrêter avant la fin du temps défini

Choix amplitude et vitesse

Choix de la piste

Liste des événements

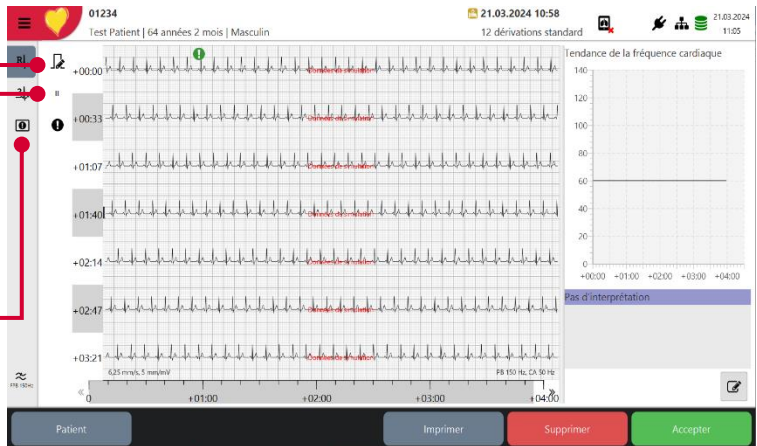

Imprimer l'enregistrement

Restez en contact ...



Support technique

0820 20 22 25



Service client

serviceclient@schillerfrance.fr



Boutique en ligne

www.mediprostore.com

