

# Notice simplifiée FRED PA-1



## Utilisation sur patient




- 1** Appelez les secours
- 15** SAMU ou **18** Pompiers ou **112** Urgences



- 2** Soulevez le capot, l'appareil démarre immédiatement.



- 3** Ouvrez le sachet d'électrodes situé dans le capot

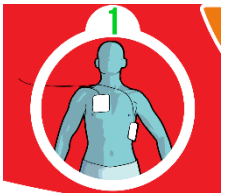

- 4** Collez les électrodes sur le patient. Si ça n'est pas le cas, connectez les à l'appareil.



- 5** L'analyse démarre automatiquement.  
**NE TOUCHEZ PAS LE PATIENT**



- 6** Si nécessaire, le choc est délivré automatiquement par l'appareil après un décompte  
**NE TOUCHEZ PAS LE PATIENT**



- 7** Quand l'appareil vous le demande, pratiquez du massage cardiaque pendant 2 minutes en suivant le rythme du signal sonore

**Suivez les instructions de l'appareil jusqu'à l'arrivée des secours**

## Contrôle visuel de l'appareil



Appareil prêt à l'emploi

Maintenance requise



Remplacez les électrodes

Remplacez la pile

